

Notice d'utilisation

Alimentation 2 entrées

0VA093



Chère cliente,

iTC vous remercie et vous félicite pour votre achat.

Avant la mise en service de votre Alimentation lire attentivement cette notice.

En cas de doute ou de problème de fonctionnement, notre équipe se fera un plaisir de vous aider.

Merci de nous contacter à SAV@itcpiercing.com

Ne démontez aucune pièce de l'alimentation.
Confiez ce travail à iNOVEL

Contenu du pack

- Une Alimentation 2 entrées dermograpes (Jack 6.35mm)
- L'adaptateur secteur

BRANCHEMENT



Traceuse
Jack 6.35mm

Pédale
Jack 6.35mm

Alimentation Secteur

Remplisseuse
Jack 6.35mm

Le branchement se fait simplement en suivant les indications sur la face arrière de l'alimentation.

FONCTIONNEMENT



Bouton Power :

Maintenir appuyer pour mettre en marche ou arrêter votre alimentation.



Flèches :

Permet d'augmenter ou de diminuer la puissance de votre alimentation. Augmente par palier de 10V.



Bouton Start :

Permet de démarrer votre dermographe si vous n'avez pas de pédale de connectée.



Bouton L/S :

Permet de passer d'un dermographe à l'autre.

Note : il y a 4 pré-réglages enregistrés pour chaque entrée dermographe.



Bouton Time :

Permet de chronométrer le temps de travail. Appuyer une fois pour mettre en marche. Appuyer à nouveau pour l'arrêter. maintenir le bouton appuyé pour la remise à zéro

00 33 (0)3 83 56 36 36

www.inovel.fr

ZAC du breuil - 18 rue Robert Schuman- 54850 messein

SIRET 379 182 017 00036 - n° TVA FR00 379 182 017

INOVEL
MAQUILLAGE PERMANENT