

PLATINE DE CONTRÔLE MAQUILLAGE PERMANENT

ESTHÉTIQUE
iNOVEL



NOTICE
D'UTILISATION
01/A077

Chère cliente,

INOVEL vous remercie et vous félicite pour votre achat.
Avant la mise en service de votre alimentation, prière de lire cette notice.

En cas de doute ou de problème de fonctionnement, notre équipe se fera un plaisir de vous aider.
Merci de nous contacter à SAV@itcpiercing.com

**Ne démontez aucune pièce de l'alimentation.
Confiez ce travail à INOVEL**

CONTENU DU PACK



ALIMENTATION & BRANCHEMENT

Entrée câble d'alimentation



Laissez branché pour recharger la batterie

Prise USB pour alimentation machine




FONCTIONNEMENT

L'écran clignote lorsque l'alimentation est branchée, cela indique que la batterie se recharge.



Allumez l'alimentation en appuyant sur le bouton «ON/OFF»

Selectionnez la zone à traiter.

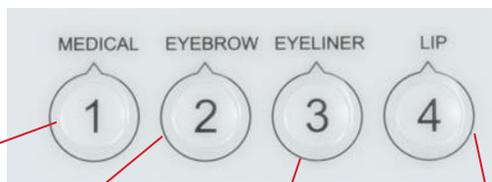

Vérifiez sur l'écran que vous êtes bien dans le mode sélectionné.

Démarrez la machine
en appuyant sur le
bouton
«Pause/Start»




Réglez le voltage
avec les boutons
«SPEED UP +» ou
«SPEED DOWN -»



AFFICHAGE

Mode
sélectionné

ON / OFF
pour la
machine

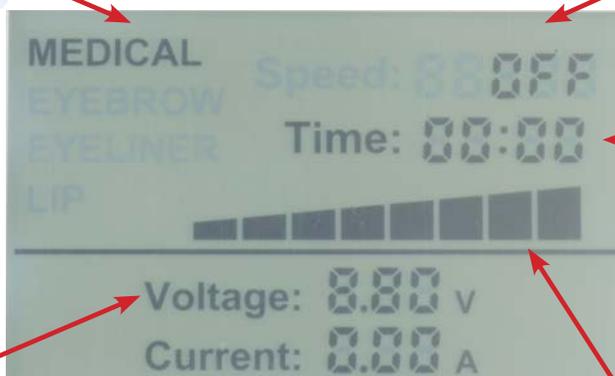

Temps de
travail de
la session

Voltage

Niveau de charge
de la batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf : OVA076

Entrée : AC 110/220V 50/60HZ

Sortie : DC 4.30 / 4.90 V - 0.02 A



ESTHÉTIQUE
INOVEL

+33 (0)3 83 56 36 36

WWW.INOVEL.FR

ZAC DU BREUIL - 18 RUE ROBERT SCHUMAN- 54850 MESSEIN

SIRET 379 182 017 00036 - N° T1/A FR00 379 182 017